

# Aero Eclipse II

## Αναπνευστικά Ενεργοποιούμενος Νεφελοποιητής (AEN)

Feedback Button = Διακόπτης Ανάδρασης

Continuous Mode = Συνεχής Κατάσταση Λειτουργίας

Breath Actuated Mode= Κατάσταση Λειτουργίας μέσω Αναπνοής

Mode Selector= Διακόπτης Επιλογής

Tubing= Σωλήνας

Nebulizer Cup= Δοχείο Νεφελοποιητή

Nebulizer Top= Κεφαλή Νεφελοποιητή

Mouthpiece (exhalation valve on bottom)= Επιστόμιο (εκπνευστική βαλβίδα στη βάση)

### Οδηγίες Χρήσης

1. Βεβαιωθείτε ότι το επιστόμιο εισάγεται στο πλευρικό άνοιγμα του νεφελοποιητή με την εκπνευστική βαλβίδα να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω.
2. Πριν τη χρήση, πραγματοποιείτε εισπνοή και εκπνοή μέσω του επιστομίου του νεφελοποιητή για την επαλήθευση της κίνησης του πράσινου διακόπτη ανάδρασης που βρίσκεται στην κεφαλή της συσκευής.
3. Ξεβιδώστε και μετακινήστε την κεφαλή του νεφελοποιητή. Εισάγετε την προβλεπόμενη φαρμακευτική αγωγή στο δοχείο του νεφελοποιητή (μέγιστος όγκος δοχείου 6 ml). Ξαναεφαρμόστε την κεφαλή και σφίξτε τη προσεχτικά με το χέρι.
4. Προσαρμόστε τη μια άκρη του παρεχόμενου σωλήνα στην εφαρμογή που βρίσκεται στη βάση του νεφελοποιητή και το άλλο άκρο στο συμπιεστή ροής ή το συμπιεσόμετρο. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια.
5. Ρυθμίστε το συμπιεστή ροής στα 7 με 8 λίτρα ανά λεπτό (L./min.) ή ενεργοποιείτε το συμπιεσόμετρο έτσι ώστε να είναι ικανό να απελευθερώνει το λιγότερο 15 με 50 P.S.I(δείκτης πίεσης) και ροή από 2,75 ως 8 (L/min.).
6. Τοποθετήστε το επιστόμιο στο στόμα, και εισπνεύστε αργά και βαθιά. Κατά την εισπνοή, ο πράσινος διακόπτης ανάδρασης στην κεφαλή του νεφελοποιητή θα μετακινηθεί στην κάθετη θέση, υποδεικνύοντας ότι το **AeroEclipse\* II BAN** παράγει αερόλυμα ως απόκριση της εισπνοής. Εκπνεύστε κανονικά. Μια βαλβίδα στο επιστόμιο ανοίγει επιτρέποντας τη παθητική εκπνοή, καθώς ο πράσινος διακόπτης ανάδρασης επιστρέφει στην επάνω θέση υποδεικνύοντας ότι δεν παράγεται αερόλυμα. Μην τοποθετείτε τα χείλη σας πάνω από την εκπνευστική βαλβίδα στη βάση του επιστομίου. Αν το κάνετε θα εμποδίσετε τη σωστή λειτουργία της βαλβίδας.
7. Συνεχίστε να εισπνέετε από το νεφελοποιητή έως ότου ο νεφελοποιητής να αρχίσει να εκβάλλει σταγονίδια, ή όπως σας έχει συμβουλευτεί ο γιατρός σας ή ο εξουσιοδοτημένος εργαζόμενος στον τομέα υγείας.

Το **AeroEclipse II BAN** μπορεί να ρυθμιστεί σε Συνεχή Κατάσταση Λειτουργίας περιστρέφοντας το διακόπτη επιλογής σε κατεύθυνση 90 μοίρες κατά τη φορά του ρολογιού στη θέση της Συνεχούς Κατάστασης Λειτουργίας (Δ). Ο νεφελοποιητής μπορεί να επιστρέψει στην Κατάσταση Λειτουργίας μέσω Αναπνοής περιστρέφοντας το διακόπτη επιλογής 90 μοίρες σε αντίθετη με τη φορά του ρολογιού κατεύθυνση στη θέση ( ).

### **Οδηγίες καθαρισμού**

Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής στη θέση λειτουργίας μέσω αναπνοής (με τον πράσινο διακόπτη ανάδρασης να είναι επάνω, το διακόπτη επιλογής να έχει περιστραφεί σε αντίθετη με τη φορά του ρολογιού κατεύθυνση) για το στάδιο πλυσίματος όπως επίσης και στεγνώματος. Όσον αφορά το χειρισμό, αφαιρέστε τον παρεχόμενο σωλήνα από τη βάση του νεφελοποιητή, ξεβιδώστε και αφαιρέστε την κεφαλή του νεφελοποιητή και προβείτε σε πλύσιμο των εξαρτημάτων του νεφελοποιητή χρησιμοποιώντας τη λύση χλιαρού νερού και υγρού απορρυπαντικού πιάτων. Ξεβγάλετε σε καθαρό χλιαρό νερό και αφήστε προσεκτικά τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πριν τη συναρμολόγηση.

### **Χρήση από έναν μόνο ασθενή**

Η συσκευή θα πρέπει να αντικαθίσταται μετά από περίπου 7 ημέρες ή αμέσως σε περίπτωση καταστροφής των εξαρτημάτων ή όταν ο νεφελοποιητής δεν λειτουργεί σωστά. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται για να επαναχρησιμοποιηθεί και δεν θα πρέπει να αποστειρώνεται ή να έρχεται σε σημείο βρασμού.

### **CEN 13544-1:2001**

#### **(E) Στοιχεία**

Η Ρυθμός Απόδοσης Αερολύματος για το Το **AeroEclipse II BAN** είναι  $0,16 \pm 0,01$  mL/min. και η Απόδοσης Αερολύματος είναι  $0,51 \pm 0,03$  mL σε Κατάσταση Λειτουργίας μέσω Αναπνοής.

### **Ενδείξεις Χρήσης**

Το **AeroEclipse II BAN** προορίζεται για χρήση από ασθενείς οι οποίοι ακολουθούν την αγωγή ή θεραπεία ενός εγκεκριμένου παραχέα υγειονομικής περίθαλψης. Η συσκευή προορίζεται για χρήση από τέτοιου είδους ασθενείς για τη διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής αερολύματος χορηγούμενης από γιατρό ή εξουσιοδοτημένο εργαζόμενο στον τομέα υγείας. Οι περιβάλλοντες χώροι στους οποίους προβλέπεται η χρήση περιλαμβάνουν το σπίτι, νοσοκομεία και κλινικές.

**ΚΙΝΔΥΝΟΙ:**

- Απαραίτητη η επίβλεψη όταν η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιείται για θεραπεία παιδιών.
- Ο Αναπνευστικά Ενεργοποιούμενος Νεφελοποιητής **AeroEclipse II** έχει τη δυνατότητα παροχής φαρμακευτικής αγωγής αερολύματος είτε σε Κατάσταση Λειτουργίας μέσω Αναπνοής είτε σε Συνεχή Κατάσταση Λειτουργίας. Στη Κατάσταση Λειτουργίας μέσω Αναπνοής, η φαρμακευτική αγωγή παρέχεται μόνο κατά την εισπνοή και μπορεί να έχει ως απόρροια την αύξηση της δοσολογίας στους πνεύμονες. Οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτή την πληροφορία σε σχέση με τη δοσολογία.
- Η αδυναμία εκπλήρωσης των παραπάνω οδηγιών μπορεί να έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες στην απόδοση της συσκευής.

**Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:**

**M. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**  
Καλαβρύτων 46 263 35 Πάτρα  
Τηλ: 2610 323235 Φαξ: 2610 620200  
Email: [info@asthmacare.gr](mailto:info@asthmacare.gr)